



## Hinweise zur Asservierung und zum Probenversand Zytologie

- **Ausstrichpräparate (z. B. Smears, Punktate, u.a.)**
  - ✓ Feuchtfixation der mit Patientenamen und Geburtsdatum beschrifteten Objektträger in 96% Alkohol für eine Stunde oder alternativ sofortige Sprayfixierung und jeweils nachfolgende Lufttrocknung für ca. eine Stunde. Eine unmittelbare Fixierung des Zellmaterials ist Voraussetzung für eine aussagekräftige Diagnostik!
  - ✓ **Ausnahme:** Schilddrüsenausstriche sollten luftgetrocknet versandt werden.
  - ✓ Einsortieren der Objektträger in gut verschließbare Präparatekästen. (Präparatekästen sind auf Anfrage erhältlich.)
  - ✓ Versand jeweils mit ausgefülltem Begleitschein (mit Patientendaten, klinischen Angaben und Ihrem Praxisstempel).
  - ✓ Verpacken der Präparatekästen und Begleitscheine/ Überweisungsscheine in die von uns bereitgestellten Versandtaschen.
  - ✓ Versand per Kurierdienst oder Post an die Pathologie & Zytologie Grandweg Hamburg
  
- **Dünnschichtzytologie ggf. mit HPV-Bestimmung (ThinPrep™)**
  - ✓ ThinPrep™-Röhrchen der Firma Hologic sind auf Anfrage erhältlich. Nur diese sind für unser Labor zu verwenden.
  - ✓ ThinPrep™-Röhrchen mit Patientenamen und Geburtsdatum beschrifteten.
  - ✓ Die Bürste gut in der Transportlösung ausspülen und dann dem Röhrchen entnehmen. WICHTIG! Anschließend Röhrchen gut verschließen.
  - ✓ Der Versand der ThinPrep™ -Röhrchen erfolgt mit dem jeweiligen Begleitschein.
  - ✓ Versand per Kurierdienst oder Post an die Pathologie & Zytologie Grandweg Hamburg
  
- **HPV-Test**
  - ✓ HPV-Röhrchen der Firma Hologic sind auf Anfrage erhältlich. Nur diese sind für unser Labor zu verwenden.
  - ✓ HPV-Röhrchen mit Patientenname beschriften (Lösungsmittelfester Stift oder gut haftender Aufkleber)
  - ✓ Verpacken des HPV-Röhrchens ggf. mit dem zugehörigen Abstrich und dem Begleitschein.
  - ✓ Versand per Kurierdienst oder Post an die Pathologie & Zytologie Grandweg Hamburg



## Pathologie & Zytologie Grandweg Hamburg

Dr. med. Magdalena Krause-Pawilczus  
Dr. med. Katja Spermhake  
Dr. med. Stephanie Haupt  
Dr. med. Tanja Glause\*

\*angestellt

Grandweg 64 | 22529 Hamburg  
Telefon 040 413 4756 0  
www.pathologie-grandweg.de

Telefax 040 413 4756 16  
kontakt@pathologie-grandweg.de

Gastroenteropathologie  
Gynäko- und Mammopathologie  
Dermatopathologie  
Uropathologie  
Kopf-Hals-Pathologie  
Knochen-, Gelenk- u. Weichgewebspathol.  
Zytopathologie  
Molekularpathologie



Dres. Krause - Spermhake – Haupt | Postfach 760143 | 22051 Hamburg

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

### Hinweise zur Asservierung und zum Probenversand Zytologie

- **Flüssigkeiten (z. B. Urin, Punktionsflüssigkeiten, Ergüsse)**
  - ✓ Versand in entsprechend großen, mit Patientenamen und Geburtsdatum beschrifteten, Gefäßen im Verhältnis 1:1 mit 50%- bis 70%iger Ethanollösung. (Auf Anfrage sind vorbereitete Versandgefäße erhältlich.)
  - ✓ Versand jeweils mit ausgefülltem Begleitschein (mit Patientendaten, klinischen Angaben und Ihrem Praxisstempel) in den von uns bereitgestellten Versandtaschen mittels Post oder Kurier an die Pathologie & Zytologie Grandweg Hamburg