



Hinweise zur Asservierung und zum Probenversand Gewebeproben

1. Fixierung in 4% gepuffertem Formalin

Alle Biopsien und auch Operationspräparate sollten in 4% gepuffertem Formalin fixiert werden, damit neben der konventionellen Diagnostik ggf. weitergehende Untersuchungen, z.B. Immunhistologie oder Molekularpathologie, zuverlässig durchgeführt werden können. Die von uns zur Verfügung gestellten Versandgefäße sind mit dieser Fixierlösung befüllt.

2. Volumenverhältnis 1:5

Das Volumenverhältnis Gewebe zu Formalin sollte mindestens 1:5 betragen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass sich ausreichend Formalin im Versandgefäß befindet, da die sonst einsetzende Autolyse zu einer deutlichen Einschränkung der histopathologischen Diagnostik führt.

3. Ausreichend großes Versandgefäß

Das Versandgefäß sollte im Verhältnis zum übersandten Gewebe eine adäquate Größe besitzen, damit eine ausreichende Fixierung sichergestellt ist und das fixierte (verfestigte) Gewebe in unserer Praxis problemlos entnommen werden kann.

4. Beschriftung mit Patientendaten

Alle Versandgefäße sind mit einem gut haftenden Patientenaufkleber zu versehen und im Falle mehrerer Proben entsprechend den Angaben auf dem Begleitschein mit einem lösungsmittelfesten Stift zu nummerieren.

5. Begleitschein ausfüllen

Der Begleitschein muss mit einem Praxis- /Klinikstempel versehen werden, um eine eindeutige Identifizierung des einsendenden Arztes oder des entsprechenden Krankenhauses zu garantieren.

6. Klinische Angaben

Für die pathologische Befundung sind zusätzliche klinische Angaben von großer Bedeutung. Hierzu gehören neben den Patientendaten das klinische Bild bzw. die klinische Fragestellung, insbesondere auch auswärtige histopathologische und andere Vorbefunde, relevante Vorerkrankungen, vorausgegangene Therapiemaßnahmen oder Medikamente.

7. Proben versandfertig machen

Die Probengefäße in die durchsichtigen Plastikbeutel packen und Letztere zusammen mit den jeweiligen Begleitscheinen in die von uns bereitgestellten blauen Versandtüten mit unserem Adressaufkleber geben und mit den zugehörigen Plastik-Clips verschlossen. Bitte nicht tackern!

8. Versand per Kurierdienst oder Post an die Pathologie & Zytologie Grandweg Hamburg