



Checkliste Probenversand zytologische Ausstrichpräparate

- Objektträger sind mit Patientennamen zu versehen
- Feuchtfixation der Objektträger in 96% Alkohol für eine Stunde bzw. Sprayfixierung und jeweils nachfolgende Lufttrocknung für ca. eine Stunde.
- Besonderheit:** Schilddrüsenausstriche bitte nur Lufttrocknen.
- Einsortieren der Objektträger in gut verschließbare Präparatekästen.
- Versand jeweils mit ausgefülltem Begleitschein (mit Patientendaten, klinischen Angaben und Ihrem Praxisstempel).
- Verpacken der Präparatekästen und Begleitscheine/ Überweisungsscheine in die von uns bereit gestellten Versandtaschen.
- Versand per Kurierdienst oder Post an die Pathologie & Zytologie Grandweg Hamburg

Alles korrekt? Dann zum Kurierfahrer oder in die Post!!

